



1- Pliez les triangles grisés vers l'intérieur.
Rentrez l'encoche rouge dans la fente correspondante. Répétez l'opération au bas du masque.

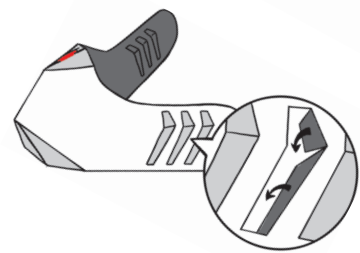

2- Vous obtenez la forme finale du masque.
Rabattez les volets des oreilles vers l'intérieur du masque.

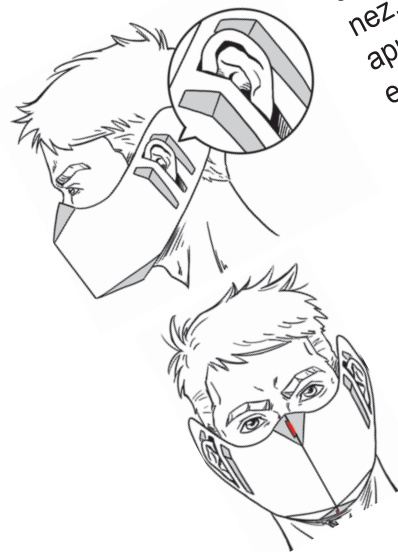

3- Ajustez le masque sur votre nez, insérez vos oreilles l'une après l'autre dans les ouvertures en vous aidant des 2 mains.

4- Vérifiez le bon maintien du masque, ajustez en montant ou descendant les oreilles dans les ouvertures.